

DIRECT SYSTEM

Vor- & klinische Behandlung



1
Wählen Sie mit dem edelweiss PEDIATRIC CROWN Sizing Guide die passende Größe für die edelweiss PEDIATRIC CROWN. (einzelne oder kombinierte PEDIATRIC CROWN Größen)



2
Zur Vergrößerung des Approximalbereichs einfach die Oberfläche der Kinderkrone mit einem Diamantbohrer anrauen.




3
Zur Reinigung der Schmierschicht kann 37 %ige Phosphorsäure verwendet werden.




4
Verklebung mit edelweiss VENEER Bond (kompatibles Bonding für alle edelweiss Produkte).



5
Lichthärtung des edelweiss VENEER Bonds für 20 Sekunden.

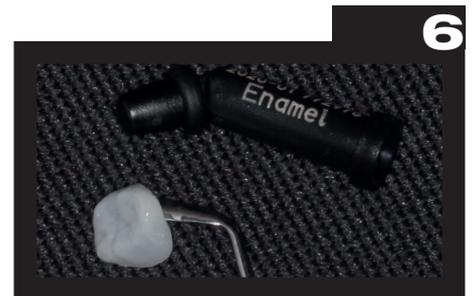

6
Aufbau des Approximalbereichs mit edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE. Dies ist das gleiche Komposit wie für die intraorale Zementierung der PEDIATRIC CROWNS.

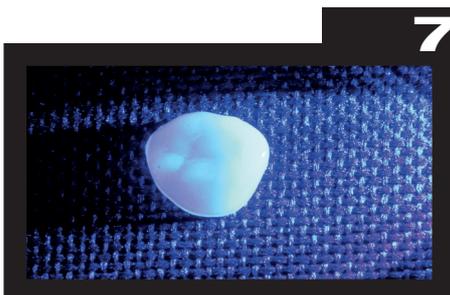

7
Lichthärtung des Kompositaufbaus für 30 Sekunden.



8
Polieren mit Spezialpolierkelchen, beginnend mit dem groben Vorpolierer, danach mit dem feinen Hochglanzpolierer.

Step by Step

9



Ätzen: Schmelz für 15 Sekunden, Dentin für 7 Sekunden.

10



Situation mit Retraktion und vorheriger Karieseliminierung.

11



Bonding für 10 Sekunden.

12



edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE zur Adhäsion der edelweiss PEDIATRIC CROWN.

13




Einsetzen der edelweiss PEDIATRIC CROWN.

14



Positionieren der edelweiss PEDIATRIC CROWN, überschüssiges Komposit entfernen.

15

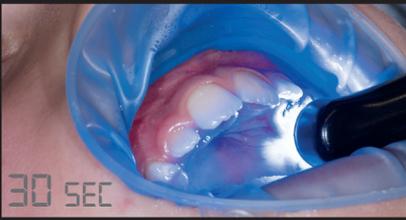

Lichthärtung für 30 Sekunden (je nach Lichtleistung).

16



Finishing.

17



Polieren mit Spezialpolierkelchen, beginnend mit dem groben Vorpolierer, danach mit dem feinen Hochglanzpolierer.

18



Endgültige Situation.