

edelweiss CAD/CAM BLOCKS

Step by Step

ZAHNPRÄPARATION



1
Pre-OP, Non-Prep.



2
Anprobe des Veneers.



3
Ätzen mit 37 %iger Phosphorsäure.



4
Gründlich mit Wasser spülen, um Ätzmittel zu entfernen.



5
Auftragen von Haftvermittler auf die Zahnoberfläche. Vorsichtig mit Druckluft trocknen.



6
Lichthärtung für 20 Sekunden.



7
edelweiss Bond dünn auf das Veneer aufbringen und 10 Sekunden lichthärten.



8
Nano-Hybrid Composite mit Instrument (Spatel) gleichmäßig im Veneer verteilen.



9
Platzierung des Veneers.



10
Entfernen von überschüssigem Material im Randbereich.



11
Lichthärtung für 20 Sekunden.



12
Endbearbeitung



13
Retraktionsfäden entfernen.



14
Finishing Strip



15
Post-OP