

edelweiss CAD/CAM BLOCKs

Step by Step

ZAHNPRÄPARATION



1
Pre-OP, Non-Prep.



2
Anprobe des Veneers.




3
Ätzen mit 37 %iger
Phosphorsäure.



4
Gründlich mit Wasser
spülen, um Ätzmittel zu
entfernen.



5
Auftragen von Haftver-
mittler auf die Zahnober-
fläche. Vorsichtig mit
Druckluft trocknen.

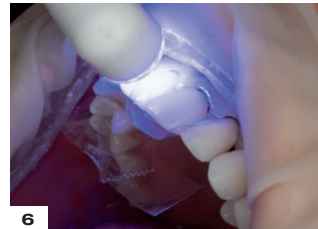

6
Lichthärtung für
20 Sekunden.



7
edelweiss Bond dünn auf
das Veneer aufbringen und
10 Sekunden lichthärten.




8
Nano-Hybrid Composite
mit Instrument (Spatel)
gleichmäßig im Veneer
verteilen.



9
Platzierung des Veneers.



10
Entfernen von über-
schüssigem Material im
Randbereich.

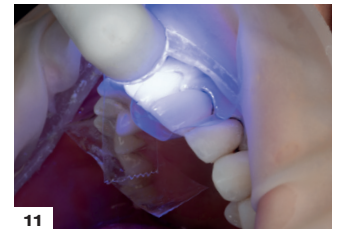

11
Lichthärtung für
20 Sekunden.



12
Endbearbeitung



13
Retraktionsfäden
entfernen.



14
Finishing Strip



15
Post-OP